

Cómo crear tentaciones para la comunicación de AAC

Animar a los usuarios de AAC a comunicarse requiere crear un entorno tentador donde se promuevan las interacciones naturales. Estas tentaciones son fundamentales en la implementación de AAC y fomentan tanto el uso rutinario como la comunicación espontánea.

Principios proactivos para las oportunidades de comunicación constantes:

Adoptar una mentalidad proactiva y los siguientes principios garantizará que esté constantemente en busca de oportunidades para crear tentaciones para la comunicación convincentes:

Acceso constante: Siempre procure que los dispositivos/herramientas de AAC sean accesibles para el usuario.

Actividades centradas en los intereses: Involucre a los usuarios de AAC en actividades que reflejen sus intereses o pasiones.


Práctica diversa: Fomente la práctica de AAC en varios entornos y con varias personas a lo largo del día.

Paciencia: Ofrezca a los usuarios de AAC un tiempo de respuesta amplio, para fomentar su independencia comunicativa.

Validación: Reconozca y valide las expresiones de los usuarios de AAC y refuerce su valor en las conversaciones.

Participación directa: Interactúe directamente con el usuario de AAC, incluso en entornos grupales o si tiene un asistente.

Consejos para crear tentaciones para la comunicación de AAC constantes:

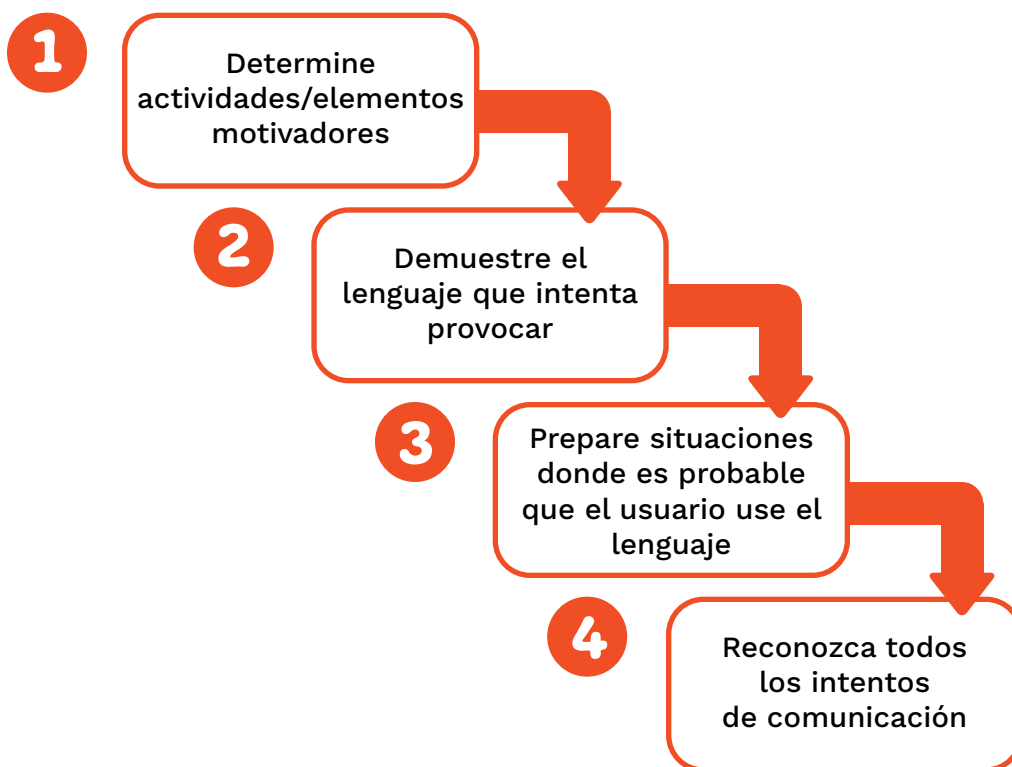

Ejemplos de cómo crear tentaciones para la comunicación de AAC

Objetos ocultos:

Coloque un juguete debajo de una manta, mostrando una parte de este. Espere a que el niño exprese su curiosidad o deseo de destaparlo.

Dibujo incompleto:

Empiece a dibujar una figura reconocible, pero déjela sin terminar. Entregue el bolígrafo al niño y espere a que la complete o comente.

Movimiento congelado:

Mientras juega con un juguete que se mueve (p. ej., un tren), deténgalo abruptamente en los carriles. Mire al niño esperando una respuesta.

Situaciones tontas:

Use gafas de sol en interiores o un sombrero al revés. Mire al niño con un semblante juguetón, esperando un comentario o acción.

Delicias fuera del alcance:

Coloque un juguete favorito ligeramente fuera del alcance del niño para que tenga que pedir ayuda o señalarlo.

Pausa en una historia:

Lea una historia conocida y deténgase antes de un momento crucial o emocionante. Espere a que el niño le pida que continúe o que adivine lo que sigue.

Refrigerio:

Envuelva su refrigerio preferido en un envoltorio difícil de abrir, animándolo a pedir ayuda.

Distracción:

Ponga música fuerte durante un trabajo silencioso, animándolo a usar la comunicación de comando, como "Baja el volumen" o "Apágalo".